

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE PROTECTION RUKO

**Composition de la matière principale** : 100 % polypropylène

**Explication sur la méthode de lavage** : Lavage en machine ménager à 60 °C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.

**Précautions d'usage** : Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Tests au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; lors du port du masque éviter de le toucher ou de le déplacer. Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ; pour retirer le masque, l'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque) le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s'il n'est plus réutilisable) ; se laver à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

**Entretien du masque** : Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac. Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

**Contexte d'utilisation** : Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

**Domaine d'utilisation** : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement des mesures d'organisation du travail ainsi que les gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignant au contact des patients.

Masques Barrière AFNOR SPEC S76-001 :2020 distribués par RUKO  
RUKO, Rue de L'Yser 59480 LA BASSEE

**Notice de mise en place du masque :**

